

Timago



MENU KLINICZNE

APARAT DO LECZENIA BEZDECHU SENNEGO YH-690



FUNKCJA, Z KTÓREJ PACJENT MOŻE KORZYSTAĆ TYLKO POD NADZOREM LEKARZA

1. Wejście w tryb MENU KLINICZNEGO

Na stronie głównej, dotknąć i przytrzymać równocześnie przez 3 sekundy dwa szare przyciski "Test maski" oraz "Ustawienia syst." (Rys. 1).

Aby przejść do Menu Klinicznego w trakcie trwania terapii, należy dotknąć i przytrzymać równocześnie przez 3 sekundy dwa szare przyciski "Rampa" i "Wilgot." (Rys. 2).



Rys. 1



Rys. 2

2. Ustawienie trybu pracy (CPAP / APAP)

Dotknąć przycisk „Tryb pracy” ("Tryb"), a następnie wybrać opcję CPAP lub APAP.

- Tryb CPAP: ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych.
- Tryb APAP: automatyczne dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych.

Po ustawieniu trybu pracy nacisnąć przycisk "Cofnij" aby powrócić do strony głównej.

3. Ustawienie ciśnienia

- W trybie CPAP, na stronie Menu Klinicznego, dotknąć opcji „Ciśnienie początkowe/terapeutyczne” („**Ciś. p.**”) – Rys. 3.
- W trybie APAP, na stronie Menu Klinicznego, dotknąć opcji „Ciśnienie początkowe” („**Ciś. p.**”) lub „Ciśnienie minimalne” („**Min ciś.**”) lub „Ciśnienie maksymalne” („**Maks ciś.**”) – Rys. 4.

Aby ustawić odpowiednią wartość ciśnienia należy:

- przesunąć palcem kropkę na osi wartości lub
- dotknąć przycisku „+” / „-” aby dostosować wartość ciśnienia manualnie (każde dotknięcie przycisku to zmiana ciśnienia o 0,5 cmH2O / hPa).

Po ustawieniu ciśnienia nacisnąć przycisk "Cofnij" aby powrócić do strony głównej.

4. Ustawienie poziomu FPS

Na stronie Menu Klinicznego, dotknąć opcji „FPS” („**Po. FPS.**”).

Aby ustawić odpowiednią wartość poziomu FPS należy dotknąć jednej z czterech opcji (Poziom 0-3).

Po ustawieniu poziomu FPS nacisnąć przycisk "Cofnij" aby powrócić do strony głównej.

5. Ustawienie poziomu ogrzewania rurki

Na stronie Menu Klinicznego, dotknąć opcji „Ogrzewana rurka” („**Ogrz. rurka**”).

Aby ustawić odpowiedni poziom należy:

- przesunąć palcem kropkę na osi wartości lub
- dotknąć przycisku „+” / „-” aby ustawić poziom ogrzewania manualnie, (każde dotknięcie przycisku to zmiana o 1 poziom),
- wybrać tryb automatyczny („**Auto**”).

Po ustawieniu poziomu ogrzewania nacisnąć przycisk „**Cofnij**” aby powrócić do strony głównej.

6. Ustawienie Poziomu wzrostu Rampa

Na stronie Menu Klinicznego, dotknąć opcji „Poziom wzrostu Rampa” („**Rampa**”).

Aby ustawić odpowiedni poziom należy:

- przesunąć palcem kropkę na osi czasu lub
- dotknąć przycisku „+” / „-” aby ustawić czas manualnie, (każde dotknięcie przycisku to zmiana czasu o 5 minut),
- wybrać tryb automatyczny („**Auto**”).

Po ustawieniu czasu Rampa nacisnąć przycisk „**Cofnij**” aby powrócić do strony głównej.

7. Ustawienie Poziomu wilgotności

Na stronie Menu Klinicznego, dotknąć opcji „Poziom wilgotności” („**Wilgot**”).

Aby ustawić odpowiedni poziom należy:

- przesunąć palcem kropkę na osi wartości lub
- dotknąć przycisku „+” / „-” aby ustawić poziom manualnie, (każde dotknięcie przycisku to zmiana o 1 poziom),
- wybrać tryb automatyczny („**Auto**”).

Po ustawieniu poziomu wilgotności nacisnąć przycisk „**Cofnij**” aby powrócić do strony głównej.

8. Usuwanie danych

Na stronie Menu Klinicznego, dotknąć opcji „Usuń dane” („**Usuń dane**”).

Dotknąć „**OK**”, aby usunąć zapisane dane terapii lub „**Anuluj**”, aby anulować operację.



Rys. 3



Rys. 4

