

INSTRUKCJA UŻYWANIA

ORMIGO STEVO

Krzesło toaletowe

Marka: ORMIGO

MD wyrób medyczny	CE oznakowanie CE	STAL stabilna rama
Regulacja wysokości nóg	Pojemnik sanitarny	110 kg maks. obciążenie



Stalowa rama | Regulacja wysokości | Pojemnik sanitarny | Podłokietniki | Nasadki antypoślizgowe

Data wydania instrukcji: 05.2026

1. Wykonanie i elementy krzesła

Krzesło toaletowe STEVO wykonane jest ze stalowej, malowanej proszkowo ramy. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi. Krzesło wyposażone jest w deskę sedesową z klapą oraz wyjmowany pojemnik sanitarny z pokrywą.

Regulacja wysokości pozwala dostosować produkt do potrzeb użytkownika, a boczne podłokietniki wspierają stabilność podczas siadania, wstawania i zmiany pozycji.



Nr	Element
1	Podłokietnik / poręcz boczna
2	Deska sedesowa / siedzisko
3	Pojemnik sanitarny
4	Regulacja wysokości nóg
5	Nasadka antypoślizgowa
6	Stalowa rama
7	Kłapa / pokrywa siedziska
8	Oparcie / uchwyt tylny

Zestaw obejmuje krzesło toaletowe, siedzisko z klapą, pojemnik sanitarny z pokrywą oraz elementy ramy zgodne z konfiguracją produktu. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że wszystkie elementy zostały prawidłowo zamontowane i zabezpieczone.

2. Przeznaczenie

Krzesło toaletowe STEVO jest pomocniczym wyrobem medycznym ułatwiającym wykonanie czynności higienicznych. Przeznaczone jest dla osób mających trudności z samodzielnym poruszaniem się, siadaniem i wstawaniem oraz dla użytkowników z ograniczoną sprawnością ruchową.

- dla osób starszych i osłabionych, które potrzebują wsparcia podczas czynności higienicznych,
- dla pacjentów w okresie rekonwalescencji, po zabiegach lub w trakcie rehabilitacji,
- do stosowania w domu, placówkach opiekuńczych, rehabilitacyjnych i medycznych.

3. Montaż i przygotowanie do użycia

Etap	Czynność
Krok 1. Kontrola po rozpakowaniu	Sprawdzić, czy produkt nie posiada widocznych uszkodzeń transportowych oraz czy wszystkie elementy są kompletne.
Krok 2. Rozłożenie ramy	Ustawić krzesło na stabilnym podłożu i rozłożyć ramę zgodnie z konstrukcją produktu. Upewnić się, że przednia część ramy jest prawidłowo połączona z bokami.
Krok 3. Montaż siedziska i kłapy	Zamontować deskę sedesową i klapę na tylnej części ramy zgodnie z konstrukcją wyrobu.
Krok 4. Montaż pojemnika	Umieścić pojemnik sanitarny pod siedziskiem na środku ramy krzesła.
Krok 5. Sprawdzenie stabilności	Przed użyciem sprawdzić stabilność produktu, stan nasadek antypoślizgowych oraz prawidłowe ustawienie wysokości nóg.

4. Regulacja wysokości

Aby wyregulować wysokość krzesła, należy wcisnąć metalowy sztyft blokujący, wybrać odpowiedni poziom wysokości nogi, a następnie upewnić się, że sztyft prawidłowo zablokował położenie. Nóżki regulowane są skokowo.

Uwaga: wszystkie cztery nogi muszą być ustawione na tym samym poziomie. Nie wolno używać krzesła, jeżeli sztyfty blokujące nie są prawidłowo zablokowane lub występują luzy w elementach regulowanych.

5. Sposób użytkowania

Przed użyciem krzesło należy ustawić na stabilnym, równym i suchym podłożu. Użytkownik powinien siadać i wstawać powoli, korzystając z podłokietników jako punktu podparcia. W przypadku osób osłabionych lub mających trudności z utrzymaniem równowagi zalecana jest asekuracja opiekuna.

- podnieść klapę sedesową i zdjąć pokrywę pojemnika przed użyciem,
- po zakończeniu użycia przykryć pojemnik pokrywą i opuścić klapę,
- opróżnić oraz oczyścić pojemnik sanitarny zgodnie z zasadami higieny,
- nie przesuwając krzesła, gdy użytkownik na nim siedzi.

6. Czynności przed każdym użyciem i zasady bezpieczeństwa

- sprawdzić, czy rama nie jest pęknięta, wygięta ani uszkodzona,
- sprawdzić stabilność krzesła na równym podłożu,
- sprawdzić, czy wszystkie nogi ustawione są na tej samej wysokości,
- sprawdzić prawidłowe zablokowanie sztyftów regulacyjnych,
- sprawdzić stan gumowych nasadek antypoślizgowych,
- sprawdzić prawidłowe osadzenie siedziska, klapy i pojemnika sanitarnego,
- nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia 110 kg,
- nie używać produktu na mokrym, śliskim lub nierównym podłożu,
- nie stawać na siedzisku, podłokietnikach ani elementach ramy,
- nie dokonywać samodzielnych przeróbek konstrukcyjnych.

Uwaga: w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek, uszkodzeń, luzów lub braków nie należy używać krzesła do czasu usunięcia problemu.

7. Czyszczenie, dezynfekcja i konserwacja

Krzesło należy czyścić regularnie, szczególnie po każdym użyciu pojemnika sanitarnego. Czystość i sprawność techniczna produktu mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkownika.

- ramę, siedzisko, klapy i podłokietniki czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką,
- stosować wodę, łagodne detergenty lub środki przeznaczone do powierzchni sprzętu medycznego,
- po każdym użyciu opróżnić, umyć i zdezynfekować pojemnik sanitarny,
- nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, benzyny, wybielaczy ani materiałów ściernych,
- po czyszczeniu dokładnie osuszyć elementy przed ponownym użyciem,
- regularnie kontrolować śruby, połączenia, sztyfty regulacyjne oraz nasadki antypoślizgowe.

8. Przechowywanie i transport

Krzesło należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od nadmiernej wilgoci, źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Podczas transportu produkt należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Jeżeli produkt jest składany do transportu lub przechowywania, należy wykonywać tę czynność ostrożnie i zgodnie z konstrukcją wyrobu. Przed ponownym użyciem należy sprawdzić stabilność oraz prawidłowe złożenie wszystkich elementów.

9. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Nazwa produktu	ORMIGO STEVO
Typ produktu	Krzesło toaletowe / krzesło sanitarne
Marka	ORMIGO
Konstrukcja	Stalowa rama malowana proszkowo
Szerokość całkowita	55 cm
Szerokość wewnętrzna	44 cm
Głębokość całkowita	47 cm
Wysokość siedziska od podłoża	43-58 cm
Wysokość całkowita	64-79 cm
Wymiary siedziska	33 x 37 cm
Waga krzesła	4,8 kg
Maksymalne obciążenie	110 kg
Kolor ramy	szary
Pojemnik sanitarny	tak, wyjmowany, z pokrywą

Szczegółowe dane techniczne oraz oznaczenia mogą być podane na etykiecie, karcie technicznej lub dokumentacji partii produktu.

10. Uwagi, gwarancja i zgłaszanie incydentów

ORMIGO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, samodzielnych przeróbek lub korzystania z uszkodzonego produktu.

Produkt objęty jest gwarancją zgodnie z kartą gwarancyjną lub dokumentem sprzedaży. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu.

Każdy poważny incydent związany z produktem należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent ma miejsce zamieszkania.

11. Informacja o wyrobie medycznym

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi użytkowania, regulacji, czyszczenia, konserwacji i bezpiecznego stosowania.

Informacja	Dane
Wyrób medyczny	Tak
Oznakowanie	CE
Przeznaczenie	Wsparcie osób z ograniczoną mobilnością podczas czynności higienicznych

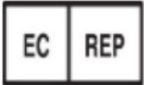
12. Dane producenta i podmiotu prowadzącego reklamę

Podmiot	Dane
Producent	ORMIGO Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Broni Pancernej 16, Poland www.ormigo.com.pl e-mail: zamowienia@ormigo.com.pl
Podmiot prowadzący reklamę	ORMIGO Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Broni Pancernej 16, Poland www.ormigo.com.pl e-mail: zamowienia@ormigo.com.pl

Dziękujemy za wybór ORMIGO! Całość oferty dostępna jest u naszych dystrybutorów oraz na stronie www.ormigo.com.pl.

MD CE

✦ 13. Oznaczenia

	Numer partii		Zapoznaj się z instrukcją
	Importer		Upoważniony przedstawiciel
	Producent		Wyrób medyczny
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych		Data produkcji
	Maksymalne obciążenie		Kod UDI