

INSTRUKCJA UŻYWANIA NEOPRENOWY STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO „LIGAMAX ANKLE” O-1120

I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim.

Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu.



UWAGA! Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

II. CHARAKTERYSTYKA

TABELA ROZMIARÓW

Rozmiar	Obwód stawu skokowego powyżej kostki
1	do 32 cm
2	do 38 cm

SKŁAD

100% Neopren

Neoprenowy stabilizator stawu skokowego „LIGAMAX ANKLE” wykonany jest z neoprenu klasy Premium. Dzięki otwartej konstrukcji umożliwia idealne dopasowanie stabilizatora do kończyny. Dodatkowe zapięcia na rzep dają możliwość regulacji poziomu stabilizacji, nie ograniczając swobody ruchu.

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

Stabilizator dokładnie przylega do kostki, zapewniając doskonałe wzmocnienie stawu. Utrzymuje odpowiednią ciepłotę ciała poprawiając wzrost cyrkulacji krwi, co znacznie zmniejsza obrzęki i uczucie sztywności stawu a także łagodzi dolegliwości bólowe.

Produkt może być używany:

- Zapobiegawczo podczas uprawiania sportu oraz aktywności fizycznej,
- W okresie rehabilitacji po opatrunku gipsowym,
- W przypadku zaburzeń związanych z niestabilnością kostki,
- W przypadku lekkich zwichnięć stawu skokowego i uszkodzeń więzadeł.

IV. PRZECIWSKAZANIA

W przypadku wystąpienia zmian na skórze w miejscach przylegania ortezy, jej stosowanie jest ograniczone i możliwe tylko pod nadzorem lekarza,


Konieczna jest ocena przez lekarza prowadzącego zastosowania ortezy w przypadku osób z zaburzeniami pamięci różnego pochodzenia, osób z zaburzeniami psychicznymi i dzieci.

V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

Ten produkt może być używany tylko zgodnie z zaleceniem lekarza, Sposób zakładania ortozy powinien być zademonstrowany przez wykwalifikowany personel medyczny, w obecności osoby, która sprawuje opiekę nad użytkownikiem (jeśli dotyczy), Produkt i jego elementy należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, Produkt należy zakładać bezpośrednio na ciało lub na skarpetkę, Produkt należy utrzymywać w czystości zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji oraz na metce umieszczonej na wyrobie. Niewłaściwe czyszczenie i konserwacja wyrobu może prowadzić do powstawania zmian skórnych, Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

VI. SPOSÓB UŻYCIA

- Upewnij się, że rozmiar produktu jest odpowiednio dobrany,
- Przed założeniem odepnij wszystkie zapięcia rzepowe i pozostaw w stanie luźnym,
- Umieść piętę w wyciętym otworze stabilizatora
- Zapnij główne rzepy na grzbietowej części stopy oraz na wysokości kostki
- Zapnij taśmy dociągowe na krzyż po obu stronach kostki

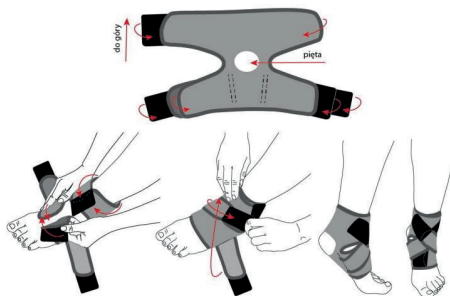

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zaleca się pranie wyrobu regularnie. Przed praniem należy zapisać wszystkie połączenia rzepowe ortozy.

- Prać ręcznie w temperaturze do 30 °C w wodzie z neutralnym, antyalergicznym detergentem,
- Płukać w letniej wodzie, nie stosować środków zmiękczających,
- Nie wybielać,
- Nie prasować,
- Nie czyścić chemicznie,
- Nie suszyć w suszarce bębnowej,
- Suszyć na płasko w zacienionym oraz przewiewnym miejscu – nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

VIII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli ortozy, zgodnie z zaleceniami producenta. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

IX. PRZEWIDZANY OKRES UŻYWANIA

Przewidzany okres używania ortozy to 5 lat. Ten czas może być dłuższy lub krótszy, zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrobu.

X. GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości. Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta). Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

XI. GŁOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Góra, nie przewracać
	Oznakowanie CE		Chronić przed wilgocią
	Numer katalogowy		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Numer modelu		Nie przecinać
	Data produkcji		Recykling
	Zajrzyj do instrukcji używania		Prać ręcznie
	Wyrób medyczny		Nie wybielać
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		Nie prasować
	Ostrzeżenie		Nie czyścić chemicznie
	Kod partii		Nie suszyć bębnowo
	Ilość		



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03 – 310 Warszawa, Polska
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl



