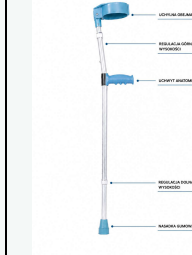
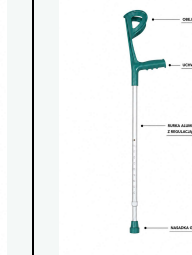
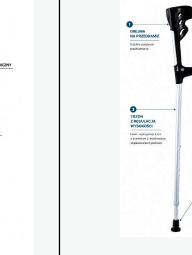


INSTRUKCJA UŻYWANIA

Kula łokciowa

ORMI C004 • C005 • C006 • C007



			
ORMI C004	ORMI C005	ORMI C006	ORMI C007

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE KAŻDEGO MODELU: 130 kg

Przed użyciem przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Budowa i elementy modeli

Ilustracje przedstawiają podstawowe elementy wyrobu. Przed użyciem sprawdź uchwyt, obejmę przedramienia, rurki, przycisk regulacji wysokości i nasadkę gumową.

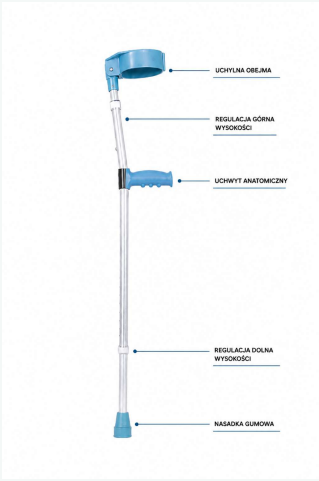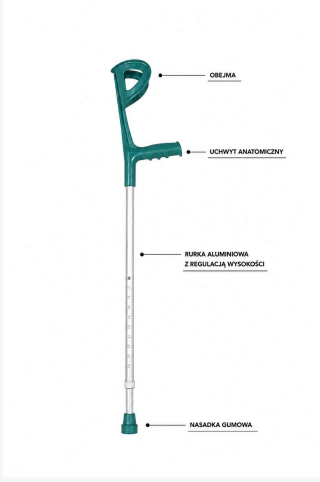	
ORMI C004	ORMI C005
	
ORMI C006	ORMI C007

1. Modele i specyfikacja techniczna

Parametr	C004	C005	C006	C007
Nazwa produktu	Kula łokciowa	Kula łokciowa	Kula łokciowa	Kula łokciowa
Materiał rury	Stop aluminium	Stop aluminium	Stop aluminium	Stop aluminium
Wysokość	86–117 cm	101–130 cm	96–119 cm	96–119 cm
Masa netto	0,6 kg	0,7 kg	0,6 kg	0,6 kg
Maks. obciążenie	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg

Dopuszczalna tolerancja wymiarów wyrobu wynosi $\pm 3\%$.

2. Przeznaczenie i ograniczenia

Kula łokciowa jest wyrobem medycznym wspomagającym chodzenie osób z ograniczoną sprawnością ruchową, w tym podczas rehabilitacji, po urazie lub zabiegu. Może służyć do częściowego albo całkowitego odciążenia kończyny dolnej zgodnie z zaleceniem personelu medycznego. Zaleca się używanie dwóch kul, o ile lekarz lub fizjoterapeuta nie zaleci inaczej.

Nie stosować, gdy poważne zaburzenia równowagi lub koordynacji uniemożliwiają bezpieczne użycie, sprawność kończyny górnej nie pozwala na pewny chwyt i podparcie albo masa użytkownika przekracza 130 kg.

3. Zestaw i przygotowanie

Zestaw każdego modelu obejmuje korpus kuli z uchwytem i obejmą, nasadkę gumową oraz instrukcję użytkowania. Sprawdź kompletność i brak uszkodzeń.

Etap	Czynność
1. Regulacja	Naciśnij metalowy przycisk blokujący i wsuń lub wysuń wewnętrzną rurkę do wymaganej wysokości.
2. Zablokowanie	Upewnij się, że przycisk całkowicie wysunął się przez wybrany otwór i blokuje obie rurki.
3. Dopasowanie	W pozycji stojącej ustaw uchwyt na wysokości stawu biodrowego, a łokieć zegnij pod kątem około 20°.
4. Obejma	Obejma powinna stabilnie i wygodnie obejmować górną część przedramienia.
5. Próba	Na płaskim, twardym i suchym podłożu sprawdź stabilność przed rozpoczęciem chodzenia.

4. Użytkowanie i bezpieczeństwo

- Sposób chodzenia i odciążania kończyny ustal z lekarzem lub fizjoterapeutą.
- Przed każdym użyciem sprawdź rurki, mechanizm regulacji i stan nasadki gumowej.
- Nie używaj na mokrym, śliskim, miękkim lub niestabilnym podłożu.
- Na schodach zachowaj szczególną ostrożność; korzystaj z poręczy lub pomocy drugiej osoby.
- Nie używaj wyrobu z pęknięciami, odkształceniami, luzami, niesprawną blokadą lub zużytą nasadką.
- Nie dokonuj modyfikacji. Nie używaj jako dźwigni, stopnia, narzędzia ani podpory do podnoszenia ciężarów.
- Chroń wyrób przed wysoką temperaturą; zachowaj ostrożność w obecności dzieci.
- Maksymalne obciążenie użytkownika dla C004, C005, C006 i C007 wynosi 130 kg.

OSTRZEŻENIE: W przypadku podrażnienia skóry, uszkodzenia lub nieprawidłowego działania natychmiast przerwij użytkowanie.

5. Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie

Czyść miękką ściereczką zwilżoną wodą lub łagodnym detergentem o neutralnym pH, a następnie dokładnie osusz. Nie stosuj rozpuszczalników, środków ściernych ani agresywnych preparatów. Przechowuj i transportuj w suchym, przewiewnym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od ciepła i wilgoci.

Kontrola	Nieprawidłowość	Postępowanie
Mechanizm regulacji	Nie blokuje się lub działa z oporem	Oczyszczyć. Przy uszkodzonym przycisku przerwać użytkowanie i wymienić element lub wyrób.
Rurki	Odkształcenie, pęknięcie lub luz	Nie używać; skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.
Nasadka gumowa	Zużycie, pęknięcie lub poślizg	Sprawdzić osadzenie; wymienić na zgodną nasadkę.
Cały wyrób	Stukanie lub utrata stabilności	Sprawdzić blokadę. Jeśli problem pozostaje, przerwać użytkowanie.

6. Incydenty, wymiana i środowisko

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent ma miejsce zamieszkania.

Wyrób wymień po stwierdzeniu pęknięć, odkształceń, nadmiernych luzów, niesprawnej blokady lub znacznego zużycia nasadki. Po zakończeniu użytkowania zutylizuj zgodnie z lokalnymi zasadami selektywnej zbiórki; nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi.

7. Gwarancja, serwis i dane podmiotu

Wyrób jest objęty gwarancją zgodnie z dokumentem sprzedaży lub kartą gwarancyjną. Zachowaj dowód zakupu. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia nasadek ani szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania, przeciążenia, wypadku, zaniedbania, nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji.

Producent / podmiot prowadzący reklamację	ORMIGO Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Broni Pancernej 16, Poland www.ormigo.com.pl e-mail: zamowienia@ormigo.com.pl
--	---

8. Oznaczenia

	Numer partii		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent		Wyrób medyczny
	Producent dokonał oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych		Data produkcji
	Maksymalne obciążenie		Kod UDI

