

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Laska aluminiowa

ORMI S005

112 kg
maks. obciążenie

0,34 kg
masa netto

73-96 cm
wysokość laski



WAŻNE	Przed użyciem upewnij się, że produkt jest całkowicie rozłożony, mechanizm blokujący jest prawidłowo zatrzaśnięty, a wszystkie stopki stabilnie stoją na płaskim, twardym i suchym podłożu.
--------------	---

1. Przeznaczenie i opis produktu

Laska jest pomocniczym sprzętem do chodzenia, przeznaczonym do użytkowania jedną ręką. Jest przeznaczona dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową lub mających trudności z poruszaniem się, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz pacjentów w okresie rehabilitacji. Zapewnia dodatkowe podparcie podczas chodzenia oraz ułatwia bezpieczne przemieszczanie się zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Wyrobu nie należy stosować u pacjentów, u których:

- występują poważne zaburzenia równowagi lub koordynacji uniemożliwiające bezpieczne posługiwanie się laską jednopunktową;
- niesprawność lub osłabienie kończyny górnej (dłoni, nadgarstka, ramienia) uniemożliwia pewne uchwycenie rączki i utrzymanie stałego nacisku na laskę;
- masa ciała użytkownika przekracza maksymalne dopuszczalne obciążenie wyrobu.

Ograniczenia stosowania: Laska nie jest przeznaczona do stosowania przez osoby, u których zaburzenia koordynacji, zaburzenia równowagi, urazy, dysfunkcje lub zaawansowane zmiany reumatyczne kończyn górnych uniemożliwiają bezpieczne podpieranie się na wyrobie.

2. Zestaw i elementy produktu

Zestaw obejmuje: korpus składanej laski z uchwytem, zamontowana stopka gumowa oraz instrukcję użytkowania. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić kompletność zestawu i stan wszystkich elementów.



Grafika poglądowa produktu

3. Przygotowanie do użycia

1. Sprawdzić, czy rama/rurka nie jest uszkodzona, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie wyrobu (czy nie występują pęknięcia ani złamania).
2. Sprawdzić, czy wyrób został prawidłowo zmontowany.
3. Sprawdzić, czy podkładka zabezpieczająca jest prawidłowo dokręcona

Etap	Czynność
Krok 1. Kontrola produktu	Sprawdzić, czy rurka, przeguby, blokada i stopki nie są uszkodzone.
Krok 2. Tryb laski	Chwycić uchwyt i sprawdzić, czy elementy są złożone oraz zabezpieczone do chodzenia.
Krok 3. Kontrola blokady	Po usłyszeniu kliknięcia delikatnie sprawdzić stabilność.

Ważne (!)

W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego działania wyrobu nie należy go używać. Należy skontaktować się z producentem lub wykwalifikowanym personelem serwisowym.

4. Regulacja wysokości i składanie

- Zalecana wysokość laski: stań prosto z naturalnie rozluźnioną ręką; górna część uchwytu powinna znajdować się mniej więcej na wysokości zgięcia nadgarstka.
- Po każdej regulacji upewnić się, że przycisk blokujący całkowicie wskoczył w otwór.
- Podczas regulacji trzymać palce z dala od otworów by uniknąć przytrzaśnięcia
- W celu wysunięcia kolca antypoślizgowego należy przesunąć pin w dolnej części laski w dół

5. Funkcje i obsługa

Funkcja	Opis
Chodzenie z laską	Trzymać uchwyt pewnie i prowadzić laskę płynnym ruchem. Nie używać przy niestabilnych lub uszkodzonych elementach.
Chodzenie z laską	Laskę należy trzymać ręką przeciwną do osłabionej kończyny dolnej..
Chodzenie z laską	Przesuwać laskę do przodu jednocześnie z osłabioną kończyną dolną, przenosząc ciężar ciała na silniejszą kończynę.
Chodzenie z laską	Podczas chodzenia nie należy ustawiać laski zbyt blisko ciała, aby uniknąć potknięcia o jej końcówki ani zbyt daleko od ciała, aby nie doprowadzić do utraty równowagi.
Chodzenie z laską	Podczas korzystania z laski na schodach należy upewnić się, że głębokość stopnia jest wystarczająca do stabilnego ustawienia całej podstawy laski. Aby wejść po schodach, należy najpierw postawić laskę na wyższym stopniu, następnie wejść silniejszą nogą, a na końcu dostawić słabszą nogę. Schodząc po schodach z laską, należy najpierw opuścić laskę, następnie słabszą (kontuzjowaną) nogę, a na końcu silniejszą (zdrową) nogę.

6. Czynności przed każdym użyciem

- Sprawdzić, czy mechanizm blokujący działa prawidłowo.
- Sprawdzić stan gumowych stopek i brak poślizgu.
- Sprawdzić dokręcenie widocznych śrub oraz stan przegubów.
- Nie używać produktu w przypadku luzów, pęknięć, odkształceń lub braku stabilności.

7. Bezpieczne użytkowanie

- Maksymalne obciążenie użytkownika i siedziska wynosi 90 kg.
- Nie używać na powierzchniach śliskich, miękkich, nachylonych lub nierównych.
- Produkt nie jest zabawką. Dzieci mogą korzystać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wykonywać samodzielnych modyfikacji konstrukcji.

Ostrzeżenie! W przypadku podrażnienia lub reakcji skórnej w miejscu kontaktu z uchwytem, należy przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenie! Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do wspomagania chodzenia. Nie wolno używać laski niezgodnie z przeznaczeniem, np. jako podpórki do przenoszenia lub podnoszenia ciężarów, dźwigni, stopnia do wchodzenia na wysokość, oparcia dla innych przedmiotów ani jako narzędzia. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie wyrobu i utratę stabilności, prowadząc do upadku i obrażeń użytkownika.

8. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Nazwa produktu	Laska aluminiowa
Model	ORMI S005
Materiał rury	Stop aluminium
Wysokość laski	73-96 cm
Masa netto	0,34kg
Maksymalne obciążenie użytkownika	112 kg

9. Warunki przechowywania i transport

Wyrób przechowywać i transportować w suchym, przewiewnym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Unikać długotrwałego przechowywania w wilgotnym otoczeniu (ryzyko korozji elementów metalowych).

10. Czyszczenie i konserwacja

Część	Metoda czyszczenia / kontroli	Częstotliwość
Rurka aluminiowa	Przetrzeć miękką, wilgotną ściereczką i dokładnie osuszyć.	W razie potrzeby
Śruby i połączenia	Sprawdzić dokręcenie i brak luzów.	Co 3 miesiące
Stopki gumowe	Sprawdzić zużycie, pęknięcia i stabilne osadzenie.	Co 3 miesiące
Mechanizm blokujący	Sprawdzić płynność działania i pełne zatrzaśnięcie.	Co 3 miesiące
Przeguby	W razie oporu nanieść niewielką ilość smaru silikonowego.	W razie potrzeby

Nie stosować środków ściernych, silnych kwasów, zasad ani żrących substancji chemicznych.

11. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Mechanizm blokujący nie trzaskuje się	Zanieczyszczenia w blokadzie lub zużyte części	Wyczyść obszar blokady. Jeśli części są zużyte, przerwij użytkowanie i skontaktuj się z serwisem.
Regulacja wysokości jest utrudniona	Zablokowany przycisk regulacji lub odkształcenie na rura	Wyczyść okolice przycisku i zastosuj smar silikonowy. Przy odkształceniu rury przerwij użytkowanie.
Stopki antypoślizgowe są luźne	Zużyte stopki albo nieprawidłowy montaż	Zamontuj ponownie lub wymień stopki na odpowiednie części serwisowe.
Słychać stukanie	Poluzowany pierścień mocujący	Należy dokręcić pierścień zaciskowy

WAŻNE

Uwaga:
w przypadku stwierdzenia luzów, uszkodzeń, pęknięć, odkształceń, nieprawidłowego działania blokady lub braku stabilności nie używaj produktu do czasu usunięcia usterki.

12. Zgłaszanie incydentów

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

13. Koniec życia wyrobu / kryteria wymiany

Wyrób należy wymienić, jeśli podczas kontroli stwierdzone zostaną pęknięcia, odkształcenia, nadmierne luzy w mechanizmie regulacji lub znaczne zużycie stopki gumowej. W przypadku wątpliwości co do stanu technicznego wyrobu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

14. Utylizacja

Po zakończeniu eksploatacji wyrób należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Metalowe elementy konstrukcyjne (aluminium/stal) oraz elementy gumowe/tworzywowe mogą podlegać segregacji i recyklingowi. Wyrób nie należy wyrzucać razem z odpadami zmieszanymi.

15. Gwarancja i serwis

Produkt objęty jest gwarancją zgodnie z dokumentem sprzedaży lub kartą gwarancyjną.

Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu.

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia elementów eksploatacyjnych w tym stoppek gumowych, ani uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania, przeciążenia, wypadku, zaniedbania, nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji.

W przypadku uszkodzenia mechanizmu blokującego, pęknięcia ramy, odkształcenia rur lub utraty stabilności należy natychmiast przerwać użytkowanie i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

16. Dane podmiotu

Producent/ Podmiot prowadzący reklamę	ORMIGO Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Broni Pancernej 16, Poland www.ormigo.com.pl e-mail: zamowienia@ormigo.com.pl
---------------------------------------	---

17. Oznaczenia i zasady podstawowe

	Numer partii		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent		Wyrób medyczny
	Producent dokonał oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi dotyczącymi wyróbów medycznych		Data produkcji
	Maksymalne obciążenie		Kod UDI

Data wydania: 2026-07